

Augentropfen

(Natriumhyaluronat 0,15 %)

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

omniVIT Augentropfen sind ein steriles konservierungsmittelfreies Produkt und bilden einen viskoelastischen, klaren Schutzfilm auf der Hornhaut. Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen.

omniVIT Augentropfen schützen und befeuchten die Augenoberfläche und machen sie gleitfähig. Dadurch bewirken sie lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlagen, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch,
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

Dosierungsanleitung und Anwendung

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge. Die Kontaktlinsen müssen während der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden.

Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

Zusammensetzung

Natriumhyaluronat (0,15 %), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

Packungsgröße

15 x 0,35 ml Ein-Dosis-Behältnisse

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.

Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.

Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt

mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.

Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da omniVIT Augentropfen keine Konservierungsmittel enthalten, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.

Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.

Nicht an infizierten Augen anwenden.

Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

Verwenden Sie omniVIT Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums.

Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

omniVIT Augentropfen enthält Phosphatpuffer. Bei längerfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von omniVIT Augentropfen zu Ausfällungen von Kalziumsalzen in der Hornhaut führen.

 **Sonstige Hinweise:**
Bei 2°C bis 25°C lagern. Vor Frost schützen.

Bedeutung der Symbole auf der Packung:

-  Hersteller
-  Nicht zur Wiederverwendung
-  Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
-  Temperaturbegrenzung

 **STERILE A** Aseptische Herstellung

 **LOT** Chargenbezeichnung

 Verwendbar bis

 Gebrauchsanweisung beachten

Stand der Information: 047_REV06 / 2020.02

 **Hersteller:**
Dr. Kleine Pharma GmbH  0481
Heidsieker Heide 114, D-33739 Bielefeld