

Kombilösung 5 in 1

MEDIZINPRODUKT

Für weiche Kontaktlinsen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

omniVIT Kombilösung 5 in 1 ist ein Komplettsystem zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen. Ihre einzigartige Formel, die Reinigungssubstanzen und Feuchtigkeitsspender vereint, hält Ihre Kontaktlinsen sauber und verleiht ihnen einen besonderen Tragekomfort. Die regelmäßige Anwendung entfernt Proteinablagerungen, die sich in der Kontaktlinse ansammeln. **omniVIT Kombilösung 5 in 1** ist für alle weichen Kontaktlinsen geeignet (z. B. herkömmliche Kontaktlinsen, Austauschlinsen, Eintageslinsen).

Anwendungshinweise:

1. Waschen Sie sich vor dem Berühren der Kontaktlinsen gründlich die Hände.
2. Nehmen Sie eine der Kontaktlinsen heraus und spülen Sie sie einige Sekunden lang ab.
3. Geben Sie ausreichend **omniVIT Kombilösung 5 in 1** in den Reinigungsbehälter, damit die Kontaktlinse vollständig bedeckt ist und legen Sie die zuvor gespülte Kontaktlinse in die Flüssigkeit. Ein Reiben der Kontaktlinse ist nicht nötig, es sei denn, es wurde von Ihrem Optiker empfohlen. Geben Sie in diesem Fall zwei bis drei Tropfen **omniVIT Kombilösung 5 in 1** auf die Linse und reiben diese ca. 20 Sekunden vorsichtig ab.
4. Nehmen Sie die zweite Kontaktlinse heraus und wiederholen Sie die Reinigungsschritte wie bei der ersten Linse.
5. Lassen Sie die Kontaktlinsen im geschlossenen Behälter über Nacht oder für einen Zeitraum von mindestens sechs Stunden liegen, damit Desinfektion und Reinigungsordnungsgemäß durchgeführt werden.
6. Spülen Sie die Kontaktlinsen vor dem erneuten Einsetzen kurz mit **omniVIT Kombilösung 5 in 1**.

Einmal in der Woche Reinigung mit Enzymen:

Diese Kombilösung entfernt automatisch die Proteinablagerungen auf der Linse, so dass sich eine wöchentliche enzymatische Reinigung erübrigt. Bei einer starken Verschmutzung der Linsen kann dennoch eine Reinigung mit Enzymtabletten erforderlich sein.

Zusammensetzung:

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Natriumcitrat, Poloxamer, Hydroxypropylmethylcellulose, Dinatriumedetat 0,02 % und Polyhexamethylenbiguanid 0,0001 % in gereinigtem Wasser.

Warnhinweise:

1. Verwenden Sie immer frische **omniVIT Kombilösung 5 in 1**. Entsorgen Sie die im Linsenbehälter verbliebene Lösung vom Vortag.
2. Bewahren Sie die Flasche gut verschlossen auf, wenn Sie sie nicht verwenden und vermeiden Sie es, mit der Tropfvorrichtung jegliche Oberflächen zu berühren.
3. Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist. Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.
6. Für den seltenen Fall, dass Sie anhaltende Augenirritationen oder anhaltendes Augenbrennen haben, nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen sofort vom Auge, setzen die Verwendung von **omniVIT Kombilösung 5 in 1** aus und wenden Sie sich an Ihren Optiker.
7. Die Kontaktlinsen dürfen maximal 30 Tage lang im geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

Lagerung:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

 /  : Siehe Faltschachtel und Flaschenboden.

STERILE A Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.

Bedeutung der Symbole auf der Packung:

-  Hersteller
-  vor Sonnenlicht schützen
-  Temperaturbegrenzung


STERILE A aseptische Herstellung

LOT Chargenbezeichnung

 Verwendbar bis

 Gebrauchsanweisung beachten

Stand der Information: 2016.04 27073 REV02

 **Hersteller:**
Dr. Kleine Pharma GmbH
Opalstraße 1, D-33739 Bielefeld

 0297

