

# Kombilösung 5 in 1

## MEDIZINPRODUKT

### Für weiche Kontaktlinsen

#### **Liebe Anwenderin, lieber Anwender!**

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

omniVIT Kombilösung ist ein Komplettsystem zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen. Ihre einzigartige Formel, die Reinigungssubstanzen und Feuchtigkeitsspender vereint, hält Ihre Kontaktlinsen sauber und verleiht ihnen einen besonderen Tragekomfort. Die regelmäßige Anwendung entfernt Proteinablagerungen, die sich auf der Kontaktlinse ansammeln. omniVIT Kombilösung ist für alle weichen Kontaktlinsen geeignet (z. B. herkömmliche Kontaktlinsen, Austauschlinsen, Eintageslinsen).

#### **Anwendungshinweise:**

1. Waschen Sie sich vor dem Berühren der Kontaktlinsen gründlich die Hände.
2. Nehmen Sie eine der Kontaktlinsen heraus und spülen Sie sie einige Sekunden lang mit der Kombilösung ab.
3. Geben Sie ausreichende Menge der Kombilösung in den Aufbewahrungsbehälter, so dass die Linse beim Einlegen komplett von der Flüssigkeit bedeckt ist und legen Sie die abgespülte Linse hinein. Sie müssen die Kontaktlinse nicht abreiben. Tun Sie dies nur, wenn es von Ihrem Optiker empfohlen wurde. In diesem Fall bringen Sie 2 oder 3 Tropfen der Kombilösung auf die Kontaktlinse auf und reiben Sie sie etwa 20 Sekunden vorsichtig ab.
4. Nehmen Sie die andere Kontaktlinse heraus und wiederholen Sie den gleichen Vorgang wie mit der ersten Linse.
5. Bewahren Sie die Kontaktlinsen für eine einwandfreie Reinigung und Desinfektion über Nacht bzw. mindestens sechs Stunden lang im geschlossenen Behälter auf.
6. Bevor Sie die Linsen erneut einsetzen, spülen Sie sie einige Sekunden lang mit dieser Lösung. Im Falle von Sehstörungen oder einem Trockenheitsgefühl während der Anwendung, kann die Kontaktlinse direkt befeuchtet werden, indem 1-2 Tropfen Kombilösung direkt in das Auge gegeben werden.

#### **Einmal in der Woche Reinigung mit Enzymen:**

Diese Kombilösung entfernt automatisch die Proteinablagerungen auf der Linse, so dass sich eine wöchentliche enzymatische Reinigung erübrigt. Bei einer starken Verschmutzung der Linsen kann dennoch eine Reinigung mit Enzymtabletten erforderlich sein.

**Inhalt:** 360 ml - Flasche mit 360 ml sterilem Inhalt und unsteriler Aufbewahrungsbox.

### Zusammensetzung:

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Natriumcitrat, Poloxamer, Hydroxypropylmethylcellulose, Dinatriumedetat 0,02 % und Polyhexamethylenbiganid 0,0001 % in gereinigtem Wasser.

### Warnhinweise:

1. Verwenden Sie immer eine frische Kombilösung. Entsorgen Sie die im Linsenbehälter verbliebene Lösung vom Vortag.
2. Bewahren Sie die Flasche gut verschlossen auf, wenn Sie sie nicht verwenden und vermeiden Sie es, mit der Tropfvorrichtung jegliche Oberflächen zu berühren.
3. Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist. Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
4. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Patienten, die auf einen der Bestandteile des Produktes allergisch reagieren, dürfen es nicht verwenden.
6. Bei andauernden Beschwerden oder Reizungen nehmen Sie die Linsen heraus, benutzen Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt oder Optiker.
7. Die Linsen dürfen höchstens 30 Tage im geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

### Lagerung:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

 **LOT** / : Siehe Faltschachtel und Flaschenboden.

 Bitte bewahren Sie Kombilösung 5 in 1 zwischen 5 °C und 35 °C auf.

**STERILE A** Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.

**Stand der Information:** 2020.03

### Vertrieb:

Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld, Deutschland

 **Hersteller:**  
Eurolent Servicios Opticis y Oftalmologicos, SL  
Avd Pintores, 28923 Alcorcón, Madrid, Spain



### Bedeutung der Symbole auf der Packung:

- |   |  |
|---|--|
|  Hersteller               |  Chargenbezeichnung       |
|  vor Sonnenlicht schützen |  Verwendbar bis           |
|  Temperaturbegrenzung     |  Packungsbeilage beachten |
|  Konformität              |  |

**STERILE A** aseptische Herstellung